

Esoxx One

Sachet monodose
Dispositif médical pour le traitement du reflux gastro-œsophagien

INDICATIONS : Esoxx One est un dispositif médical qui exerce une action mécanique permettant de réduire rapidement les symptômes liés au reflux gastro-œsophagien : pyrosis, douleur épigastrique, régurgitations acides, toux d'irritation et dysphonie.

Le reflux gastro-œsophagien, fréquemment abrégé en RGO, est caractérisé par des symptômes (pyrosis, régurgitations acides, toux d'irritation et dysphonie) qui peuvent être ou non associés à des lésions inflammatoires érosives de la muqueuse œsophagienne. La position couchée aggrave généralement le RGO, qui peut donc être plus sévère durant la nuit.

Esoxx One est une association d'acide hyaluronique et de sulfate de chondroïtine qui protège la muqueuse gastro-œsophagienne par un mécanisme original et novateur.

La présence d'un composant à capacité bioadhésive élevée (poloxamer 407) dans la formulation d'Esoxx One permet à l'acide hyaluronique-sulfate de chondroïtine de rester à la surface de la paroi de l'œsophage, contribuant ainsi à l'effet protecteur contre l'action de l'acide chlorhydrique produit par l'estomac. Le sulfate de chondroïtine exerce également une action qui favorise le processus de réparation de la muqueuse gastro-œsophagienne.

COMPOSITION : Acide hyaluronique, sulfate de chondroïtine, polyvinylpyrrolidone, xylitol, benzoate de sodium, sorbate de potassium, arôme de raisin, eau déminéralisée, poloxamer 407.

CONDITIONNEMENT : 20 sachets de 10 ml (conditionnement contenant une dose unique).

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION : Un sachet (conditionnement correspondant à une dose unique) après les principaux repas et avant le coucher, ou selon les recommandations du médecin. Esoxx One peut être bu directement du sachet.

CONTRE-INDICATIONS : Il n'y a pas de contre-indications spécifiques, à l'exception d'une hypersensibilité à l'un des composants du produit. En ce cas, arrêtez le traitement et contactez votre médecin. Malgré l'absence d'effet indésirable connu, ce produit ne doit pas être utilisé au cours de la grossesse ou des premiers mois de l'allaitement. Dans tous les cas, il est conseillé de consulter préalablement votre médecin. Il n'y a pas d'interactions connues avec d'autres produits administrés par voie orale.

MISES EN GARDE : Ne pas dépasser la dose recommandée. Si les symptômes persistent, consulter votre médecin. Par absence de données cliniques chez les enfants de moins de 12 ans, ne pas utiliser ce produit chez les enfants de moins de 12 ans. Ne pas utiliser le produit après la date de péremption imprimée sur la boîte. Conserver dans un endroit frais et sec à l'écart de toute source de chaleur. Ne pas congeler. Tenir hors de la portée des enfants.


DISTRIBUTEUR : Alfasigma France
14, Boulevard Des Frères Voisin
92130 Issy Les Moulineaux – France

FABRICANT :
Apharm srl - Via Roma, 26 - 28041 - Arona – Italie

ESOX 2D
Rev. 06 - 11/2020



ALFASIGMA

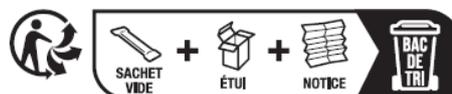

Séparez les éléments avant de trier

